

# מדריך הפעלה למכשיר אדים קרים

GL - 6675



היבואן: מ. פיינגרש ושות' בע"מ  
רח' דותן 2, יבנה, טל: 08-9999399  
המרכז למוצרים רפואיים ואורטופדיים

**MF**



## חלקי המכשיר

1. יציאת האדים
2. מיכל מים
3. גוף המכשיר
4. בסיס
5. נורית הפעלה
6. מפסק הדלקה / כיבוי וכיוון עוצמת אדים

## הוראות בטיחות

- קרא בעיון את ההוראות לפני תחילת השימוש במכשיר:
1. אין לגעת בכבל החשמל בידיים רטובות.
  2. במקרה שהמכשיר רועד יש לנתקו מהחשמל.
  3. יש לשמור שכבל החשמל לא ינזק או ירטב.
  4. אין להרשות לילדים לשחק עם המכשיר.
  5. המכשיר אינו מיועד לשימוש מחוץ לבית.
  6. אין להדליק את המכשיר ליד מקור חימום ו/או חומרים דליקים.
  7. במידה והמכשיר ניזוק יש להביאו למעבדה.
  8. אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תתבצע על ידי היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.
  9. אם מים דולפים מהמכשיר, אין להשתמש יותר במכשיר.
  10. מומלץ לאוורר מדי פעם את החדר שבו נעשה שימוש במכשיר.

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם העדר ניסיון וידע, אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם. ילדים צריכים להיות תחת השגחה כדי להבטיח שהם לא משחקים עם המכשיר.

## אזהרה:


אין להוסיף שמנים או חומרים אחרים למיכל המים

## הוראות הפעלה

1. יש למקם את המכשיר על משטח ישר ויציב.
2. למילוי מים יש להסיר את המכסה העליון, להחזיק הפוך את מיכל המים, לפתוח את מכסה המיכל ולמלא במים נקיים, לסגור את המכסה ולנגב עם מגבת יבשה את טיפות המים ולהשיב את המיכל למקומו.
3. יש לחבר את המכשיר למקור מתח של 230 v.
4. צבע אדום של נורית ההפעלה מלמד שהמכשיר מעביר מים מהמיכל לבסיס או על מחסור במים במיכל.
5. צבע כחול של נורית ההפעלה מלמד שהמכשיר מוכן להפעלה.
6. יש לכוון את עוצמת האדים הדרושה על פי רמת היובש בחדר.
7. עם התרוקנות המים מהמיכל, נורית ההפעלה תישתנה לצבע אדום ואז יש לכבות את המכשיר ולמלא את מיכל המים מחדש.
8. פעם ביום (במהלך שימוש שגרתי): יש לרוקן את המכשיר, לנגבו, לייבשו ולמלא אותו במים רתוחים שצוננו.
9. פעם בשבוע (במהלך שימוש שגרתי): יש לנקות את פנים המכשיר בחומר מתאים (כגון: סבון, חומץ, סודה, תמיסת מלח לבישול או תחליף דומה) ולייבש אותו.



פתיחת מכסה

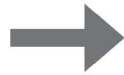

מילוי מים

**אזהרה:** אין למלא את מיכל המים במים מעל 40°C. יש לכבות ולנתק את המכשיר מהחשמל לפני ביצוע פעולות תחזוקה וניקוי. יש לכבות ולנתק את המכשיר מהחשמל לפני מילוי מים במיכל.

## אמצעי זהירות

1. יש לקרוא בעיון את ההוראות, גם אם מכירים את המכשיר.
2. יש לוודא שמקור המתח של המכשיר מתאים לזה שבבית.
3. אין להפעיל את המכשיר ליד מקור חום.
4. אין להפעיל את המכשיר תחת קרינת שמש ישירה.
5. כדאי להפעיל את המכשיר הרחק ככל האפשר מרהיטים ומכשירי חשמל.
6. יש לרוקן את המכשיר ממים, ליבש את המיכל ולנתק מהחשמל כאשר איננו בשימוש.
7. יש להיזהר שלא יזלגו מים לגוף המכשיר.
8. אין למלא את מיכל המכשיר פרט למים נקיים.
9. אין להזיז את המכשיר בזמן פעולה.
10. יש לדאוג שכבל המכשיר לא ירטב ואין למשוך אותו בחוזקה.
11. אין להשתמש במכשיר למטרה אחרת פרט ליעודו.
12. אין להוסיף שמנים או חומרים אחרים למים במיכל.
13. אם מים דולפים מהמכשיר, אין להשתמש יותר במכשיר.

## ניקוי המכשיר

1. לפני ניקוי המכשיר יש להוציא את המכשיר מהחשמל.
2. יש לנקות את המיכל עם מים נקיים וליבש בעזרת מטלית בד יבשה.
3. רצוי לחטא לפחות פעם בשבוע את המיכל וכל שטח הפנים הבא במגע עם מים, בעזרת מלח לימון או חומץ או סבון על מנת להסיר משקעים ולמנוע התרבות משקע של אבנית וחיידיקים בדפנות המיכל.
4. לאחר שימוש בחומר חיטוי כל שהוא, יש לרוקן את המיכל לחלוטין ולשטוף מספר פעמים במי ברז, לייבש הייטב ולאחסן במקום יבש ומאוורר.
5. כאשר המכשיר איננו בשימוש לפרק זמן ארוך, יש לנקותו ולייבשו ולאחסן במקום יבש ומאוורר.
6. לאחר האחסון וטרם חידוש השימוש, יש לנקות שוב היטב את המכשיר.



הוספת מלח לימון



ניקוי באמצעות מברשת

## מפרט טכני

GL - 6675	דגם
230V	מקור מתח
50Hz	תדר
32W	צריכה
4.0 L	קיבולת
250mL/h	עוצמה סטנדרטית ליציאת אדים

פתרון	סיבה אפשרית	בעיה
חיבור כבל החשמל בדיקת מתג ההפעלה	כבל החשמל לא מחובר מתג ההפעלה כבוי	מכשיר לא דולק
יש למלא מים נקיים במיכל כוון את עוצמת האדים לחץ על שסתום הבטיחות	אין מים במיכל כפתור עוצמת האדים כבוי שסתום בטיחות לא לחוץ	מנורה דולקת יש רוח אין אדים
איוורור מיכל המים ל-12 שעות ומילוי במים נקיים	מכשיר חדש, מים מלוכלכים	לרסס האדים יש ריח רע
רוקן מעט מים	יותר מדי מים	מנורה דולקת אין אדים

היבואן: מ. פיינגרש ושות' בע"מ  
רח' דותן 2, יבנה, טל: 08-9999399  
המרכז למוצרים רפואיים ואורטופדיים



## אחריות המכשיר הינה לשנה כנגד הצגת חשבונית קניה

האחריות מוגבלת לתיקון או החלפה ללא תשלום של כל חלק במוצר אשר יראה לנו פגום ואשר לפי שיקול דעתנו נגרם כתוצאה מפגם בייצור.

האחריות לא תחול במקרים הבאים:

- א. קלקול שנגרם שלא בהתאם להוראות השימוש.
  - ב. שבר או תקלה שנגרמו כתוצאה מרשלנות או הזנחת המוצר או נזקים עקב גורמים חיצוניים.
  - ג. טיפול, שינוי או תיקון כלשהו אשר נעשה ע"י מי שלא הוסמך על ידנו.
- אין האחריות כוללת חלקים מתכלים.